

# Appareil de force extra orale de traction NOLA Great Lakes



## Masque facial de force extra orale

300-306 Petit  
300-307 Grand



## Appareil de force extra orale Hickham

300-308 Petit  
300-309 Grand

### INFORMATIONS POUR LES COMMANDES AU VERSO ►

## Avantages de l'appareil de force extra orale de traction NOLA :

- Le masque facial NOLA est facile à ajuster et est équipé d'un bandeau confortable.
- L'appareil de force extra orale Hickham est confortable pour une utilisation pendant le sommeil, n'inhibe pas le mouvement mandibulaire, et est également idéal pour un port de jour.
- Les appareils de force extra orale de traction NOLA sont conçues pour amener des dents individuelles, des groupes de dents, ou des arcs entiers vers l'avant. Le dispositif est entièrement réglable et offre deux tailles de mentonnière.

## Suggestions de traitement :

Les élastiques fixés aux dents terminales agissent comme des élastiques de classe III sur l'arcade supérieure. En d'autres termes, ils auront tendance à ouvrir l'occlusion en extrudant ces dents. Il est donc souhaitable que les élastiques soient fixés sur la partie antérieure de l'arc. Ceci est particulièrement vrai dans les cas de classe III où le prémaxillaire doit être développé vers le bas et vers l'avant dans un schéma de croissance normal.

Occasionnellement, le patient transpire excessivement pendant les trois premiers jours suivant la pose de la mentonnière. Les tissus s'adaptent et la transpiration cesse généralement. N'essayez pas de remédier le problème en perçant des trous dans la mentonnière pour la circulation de l'air. L'air ne circulera pas à travers les trous et le patient n'aimera pas l'aspect tacheté du menton lorsque la coupelle est retirée. Si la transpiration persiste, ou si le patient est allergique à l'acrylique, des doublures en tissu sont disponibles.

**RAPPEL IMPORTANT POUR LES MÉDECINS !** Pour éviter tout risque de blessure aux yeux, veiller à informer les patients et les parents sur les précautions de sécurité à prendre lors de la mise en place et du retrait d'un appareil extra oral. Mettre également en garde les patients contre tout jeu brutal ou risqué lors du port de l'appareil extra oral.

**ARTICLE****N° COMMANDE**

<b>Appareil de force de traction et pièces de rechange</b>	
Masque facial petite taille	300-306
Masque facial grande taille	300-307
Appareil Hickham petite taille	300-308
Appareil Hickham grande taille	300-309
Serre-tête pour Hickham (deux tailles)	300-312
Sangle frontale et écrous autobloquant pour masque facial (deux tailles)	300-313
Écrous autobloquant pour sangle frontale (2/pkg)	300-314
Embouts protecteurs en plastique (10/pkg)	300-316



**Great Lakes**<sup>®</sup>  
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150 USA  
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626  
Great People. Great Products. **Great Lakes.**