



# Arco de tracción variable Great Lakes NOLA

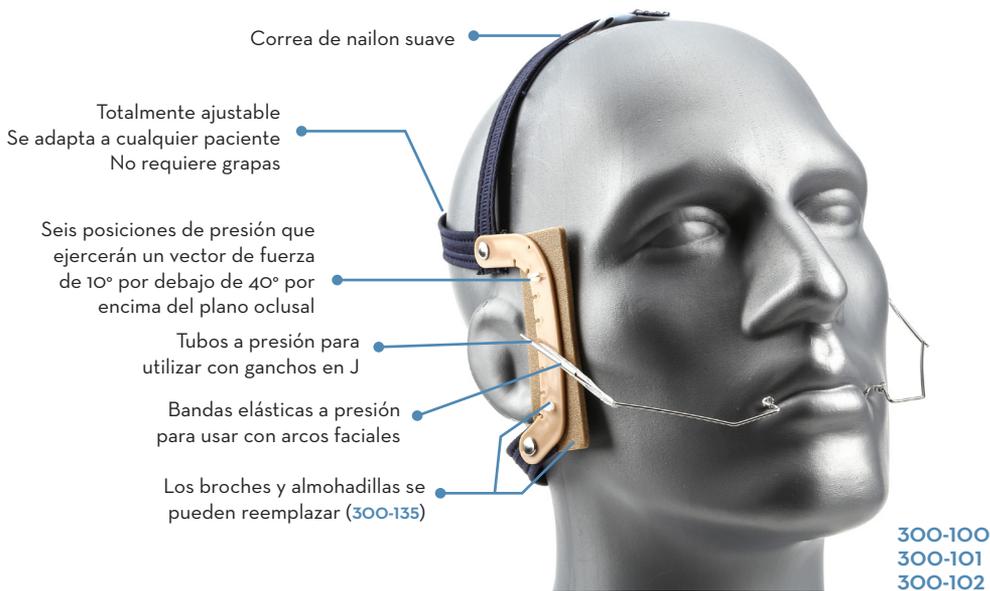

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS AL DORSO ►

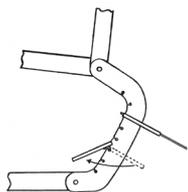

La dirección de tracción está determinada por la posición del gancho en J y la unidad del tubo en la placa frontal. Esta posición se puede cambiar fácilmente. El tubo se extrae girándolo 180° y luego sacando el gancho del tubo del ojo de la cerradura en la placa frontal.

## Ventaja de seguridad del aparato extraoral con gancho en J de NOLA

En comparación con los dispositivos desmontables que se utilizan con los arcos faciales actualmente disponibles, el aparato extraoral con gancho en J es igual o más seguro. Los arcos faciales son potencialmente peligrosos porque ambos lados están conectados manteniendo los extremos internos del arco centrados con la cara.

Además, la mayoría de los dispositivos desmontables permiten sacar el arco facial de la boca antes de que se alcance una fuerza de rotura.

## El gancho en J tiene las siguientes ventajas:

1. Los ganchos derecho e izquierdo no están conectados. Si alguno de los dos se suelta, se saldrá y se desprenderá de la cara.
2. El recorrido hacia adelante y hacia atrás del gancho en J está limitado por el extremo doblado y el gancho elástico soldado. (Fig. A)



Fig. A

| ARTÍCULO                                                                        | NÚMERO DE PEDIDO                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Arcos, ganchos en J y accesorios</b>                                         |                                                        |
| Arco de tracción variable (5 por paquete)                                       | Negro 300-100<br>Azul marino 300-101<br>Marrón 300-102 |
| Arco de tracción alta (5 por paquete)                                           | Negro 300-107<br>Azul marino 300-103<br>Marrón 300-105 |
| Arco de ajuste rápido (5 por paquete)                                           | 300-104                                                |
| Gancho en J de retracción del arco cuspídeo/deslizante (5 pares/paquete)        | 300-121                                                |
| Gancho en J de retracción bicuspídea (5 pares/paquete)                          | 300-122                                                |
| Gancho en J de retracción del arco cuspídeo/deslizante: largo (5 pares/paquete) | 300-123                                                |
| Gancho en J de alta retracción (5 pares/paquete)                                | 300-125                                                |
| Gancho en J de alta retracción: largo (5 pares/paquete)                         | 300-126                                                |
| Tubos de acero inoxidable para arco de tracción variable (10 por paquete)       | 300-131                                                |
| Tubos a presión para arco de ajuste rápido (10 por paquete)                     | 300-132                                                |
| Ganchos a presión para arco de ajuste rápido (10 por paquete)                   | 300-133                                                |
| Almohadillas de tela deslizables (20 por paquete)                               | 300-134                                                |
| Almohadillas a presión para todos los arcos (20 por paquete)                    | 300-135                                                |
| <b>Aparato extraoral de protracción y piezas de recambio</b>                    |                                                        |
| Máscara facial pequeña                                                          | 300-306                                                |
| Máscara facial grande                                                           | 300-307                                                |
| Hickham pequeño                                                                 | 300-308                                                |
| Hickham grande                                                                  | 300-309                                                |
| Correa para la cabeza Hickham (ambos tamaños)                                   | 300-312                                                |
| Correa para la frente y contratuercas para máscara facial (ambos tamaños)       | 300-313                                                |
| Contratuercas para correa de frente (2 por paquete)                             | 300-314                                                |
| Puntas protectoras de plástico (10 por paquete)                                 | 300-316                                                |

**¡RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS!** Para evitar el riesgo de lesiones oculares, asegúrese de informar a los pacientes y a los padres sobre las precauciones de seguridad adecuadas al colocar y extraer el aparato. También advierta a los pacientes que no deben jugar de forma brusca o correr riesgos innecesarios mientras lo lleven puesto.